



## Järven Evakuierungstücher "Die Besten im Test"

Es gibt heutzutage verschiedene Bergetücher mit Tragegriffen auf dem Markt, bei denen der schwedische Standard, SS 876 00 39, in Bezug auf die Gleitfähigkeit und die Haltbarkeit der Tragegriffe nicht erfüllt ist. Dies könnte den Kunden leicht zu der irrigen Annahme führen, dass ein solches Produkt für die Evakuierung geeignet wäre.

Die Järven Evakuierungstücher liegen mit einer Belastbarkeit von 2000 N (200 kg) weit über dem Schwedischen Standard, SS 876 00 39, der eine Widerstandskraft von 1000N (100 kg) sowie eine extrem hohe Gleitfähigkeit auf allen festen Unterlagen wie PVC, Linoleum, Stein, Nadelfilz u.ä. garantiert.


### Järven Evakuierungstücher – die meistverkauften Evakuierungstücher am Markt

Die Järven Evakuierungstücher wurden bisher über 100 000 mal weltweit verkauft. Unsere Evakuierungstücher wurden bei mehreren erfolgreichen Evakuierungen eingesetzt, bei denen das Personal mit der Hilfe unserer Evakuierungstücher schnell und effizient Patienten vor lebensbedrohlichen Situationen schützen konnte.


Unsere Evakuierungstücher wurden zu den Besten im **Test \*** erklärt und tragen jeden Tag zur Sicherheit Ihrer Patienten bei.

\* Växjö hälsan

Messung der Zugkraft auf trockenem und nassem Boden

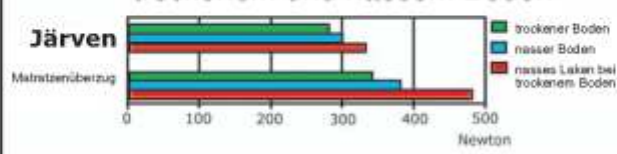

**SICHERHEIT • STÄRKE • HYGIENE**

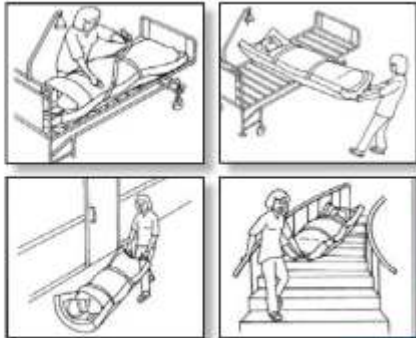

Gebrauchsmusterschutz Nr 200 23 065.4



## Järven Evakuierungstücher

Järven Evakuierungstücher werden immer unter der Matratze eingelegt. Dies garantiert eine schnelle Evakuierung Ihrer Patienten im Notfall. Eine Person ist allein in der Lage, einen Patienten zu evakuieren!

Järven Evakuierungstücher besitzen an Kopf und Fußende eine ausreichende Anzahl an Griffen, die ein falsches Einlegen im Bett unmöglich machen.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Funktionsfähig mit allen Bettenmodellen
- Funktionsfähig mit allen vorhandenen Pflegematratzen
- Sichere Bedienung durch eine Person
- Funktioniert mit einteiligen und dreiteiligen Matratzensystemen
- Gleitfähig auf allen festen Unterlagen (z.B. PVC, Linoleum, Stein, Nadelfilz u.ä.)
- Gleitfähig auf trockenen und nassen Böden
- Sichere Fixierung des Patienten
- Belastbar bis 200 kg
- Hergestellt aus einem flamsicheren Material
- Für den Einsatz im Krankenhaus röntgentransparent
- Ausstattung mit Griffen am Kopf – und Fußende, damit ein falsches Einlegen unmöglich ist
- Ausstattung mit 4 Griffen an den Seiten, damit eine Übernahme vom Rettungsdienst ohne Umlagern möglich ist
- Waschbar bis 90° C und desinfizierbar
- Nahtloses Einfügen in Ihr betriebliches Konzept, da sonst die dauerhafte Nutzung fraglich wird
- Schulung und Ausbildung in Ihrem Haus durch den Hersteller

### Reinigung der Evakuierungstücher

- Als Desinfektionsmittel für die übliche Wischdesinfektion empfehlen wir bei praxisorientierten, gebrauchsfertigen Anwendungskonzentrationen u.a. Meliseptol, Spitacid, Softasept, Softaman, Biguamed, Peform oder Indicin plus. Bei einer Schlussdesinfektion muss die vorgeschriebene Einwirkzeit eingehalten werden.
- Die Järven Evakuierungstücher können in einem separaten Waschgang oder in einem Wäschebeutel bis 90° C gewaschen werden.
- Eine thermische Desinfektion mittels VDA-Anlage (bis 105°C) kann bei einer Kontamination mit bestimmten Erregern (z.B. MRSA) durchgeführt werden.
- **Wichtig!** Vor dem Waschen die Klettverschlüsse aufeinanderlegen, um auszuschließen, dass andere Textilfasern in die Klettverschlüsse eindringen.

Art.Nr.	Für Matratzenbreite
9902	85-90 cm
9903	95-100 cm

Sollten Sie andere Maße benötigen, teilen Sie und das bitte bei Ihrer Bestellung mit.



(Gebrauchsmusterschutz Nr. 200 23 065.4)

**Gerne stellen wir Ihnen umfassendes Informationsmaterial zur Verfügung.**

### Järven Health Care